

## Gebrauchsinformation

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater, Apotheker oder Arzt.

### Otodolor® soft

Glycerol (wasserfrei)

Ohrentropfen ohne Konservierungsmittel für Kinder und Erwachsene

#### **Was ist Otodolor® soft?**

Otodolor® soft ist eine konservierungsmittelfreie Lösung zum Eintropfen in das Ohr (äußerer Gehörgang). Sie enthält ausschließlich Glycerol, eine klare, farblose, dickflüssige Substanz.

Ein Fläschchen enthält 7 g Lösung.

#### **Wozu dient Otodolor® soft?**

Die Ohrentropfen werden zur Erleichterung der Beschwerden bei Reizungen des äußeren Gehörganges, die sich z. B. durch Juckreiz oder Schmerzen bemerkbar machen, angewandt. Solche Beschwerden werden oftmals durch chlorhaltiges Wasser, Tauchen oder Wind hervorgerufen.

Auch die vorbeugende Anwendung zum Schutz des Ohrs vor und nach dem Baden oder Tauchen ist möglich.

#### **Wann sollte man Otodolor® soft anwenden?**

Sommerzeit bedeutet Badezeit! Doch hieraus ergeben sich oftmals Gefahren für das Ohr, da viele Menschen regelmäßig unter Ohrenentzündungen nach dem Schwimmen, Baden oder Tauchen leiden. Aus diesem Grund nennt man das Beschwerdebild auch "Badeotitis" oder "swimmer's ear". Es gibt aber auch andere Ursachen, die zu einer Gehörgangsentzündung führen können. Hierzu zählen u. a. falsche Reinigungsmaßnahmen mit Wattestäbchen, Zündhölzern oder ähnlichen Instrumenten; das häufige und lange Tragen von "Walkman-Kopfhörern" oder Head-Sets; Ohrenschmalz, das den Gehörgang verstopft; Fremdkörper, die in das Ohr eingedrungen sind. Auch die zu häufige Benutzung von waschaktiven Substanzen, wie sie in Shampoos, Duschgels oder Seifen enthalten sein können, zerstören den natürlichen Schutzfilm des Ohres. Die Haut im Gehörgang wird empfindlicher gegenüber allen mechanischen, thermischen oder chemischen Reizungen. Gehörgangsentzündungen sind die Folge.



**URSAPHARM**  
ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG



Im Anfangsstadium juckt der Gehörgang stark; es kommt zu einer Schwellung, die von unterschiedlich stark ausgeprägten Schmerzen begleitet ist.

Glycerol in Otodolor® soft reinigt und pflegt die Haut, verringert die Schwellung und führt somit auch zu einer Abnahme der Schmerzen.

### **Wann sollte man Otodolor® soft nicht anwenden?**

Otodolor® soft sollte nicht bei einer Überempfindlichkeit gegenüber Glycerol oder einer Trommelfellverletzung (Trommelfellperforation) angewendet werden.

### **Was ist das besondere an Otodolor® soft?**

Die Ohrentropfen enthalten als einzigen Bestandteil Glycerol, häufig auch Glycerin genannt. Es ist eine Verbindung, die natürlicherweise in allen pflanzlichen und tierischen Fetten und Ölen vorkommt. Den höchsten Gehalt findet man in Kokosnussöl. Glycerol hat zwei Eigenschaften, die für die Anwendung als Ohrentropfen besonders wichtig sind: durch den öligen Charakter haftet es gut auf der Haut und trägt zu ihrem Schutz und Pflege bei. Darüber hinaus besitzt es ein hohes Wasserbindungs- bzw. Wasseranziehungsvermögen. Dies führt dazu, dass dem geschwellenen Gewebe Wasser entzogen wird (osmotischer Effekt) und der Druck im Gewebe abnimmt. Die Schwellung geht zurück und die Schmerzen nehmen ab.

### **Wie wendet man Otodolor® soft an?**

Nach Bedarf etwa 2-3 Tropfen (körperwarm) bei seitlicher Ruhelage in den Gehörgang des betroffenen Ohres träufeln, das anschließend mit Watte verschlossen werden kann.

### **Wie oft und wie lange sollte man Otodolor® soft tropfen?**

Hinsichtlich der Anwendungshäufigkeit bzw. Anwendungsdauer bestehen keine Einschränkungen.

### **Welche weiteren Hinweise zur Anwendung sind zu beachten?**

Klingen die Beschwerden nach wenigen Tagen nicht wieder ab oder hat sich Fieber eingestellt, dann sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **Welche Hinweise zur Aufbewahrung von Otodolor® soft sind zu beachten?**

Otodolor® soft sollte nach Ablauf des Verfalldatums (☞) nicht mehr verwendet werden.

Bewahren Sie Otodolor® soft außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Nach der ersten Anwendung sollten Sie Otodolor® soft nicht länger als 4 Wochen benutzen. Vermerken Sie daher den ersten Tag der Anwendung auf dem Fläschchen.

Hersteller:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG, Industriestraße 35, D-66129 Saarbrücken



### **Ihre Meinung ist für uns wichtig!**

Damit Otodolor® soft Ohrentropfen noch besser an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann, sind uns Ihre Anregungen sehr wichtig. Bitte schreiben Sie uns!

Coupon bitte einsenden an:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken

oder an folgende Fax-Nummer: 0 68 05 / 92 92 222

oder über [www.ursapharm.info/otodolorsoft](http://www.ursapharm.info/otodolorsoft)

#### **1. Wann wenden Sie Otodolor® soft Ohrentropfen an?**

- Bei Reizungen des äußeren Gehörganges?  
 Vorbeugende Anwendung zum Schutz vor Ohrenentzündungen?  
(vor und/oder nach dem Baden, Schwimmen und Tauchen)  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

#### **2. Wie beurteilen Sie Otodolor® soft Ohrentropfen?**

**Die Wirkung**

- Sehr gut  Gut  Teils/Teils  Schlecht  Sehr schlecht

#### **Die Wirkungsdauer**

- Sehr gut  Gut  Teils/Teils  Schlecht  Sehr schlecht

#### **Die Verträglichkeit**

- Sehr gut  Gut  Teils/Teils  Schlecht  Sehr schlecht

**3. Ich gebe meine Einwilligung, dass meine Daten bei URSAPHARM gespeichert werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben!**

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Alter, Beruf (freiwillige Angabe)

Datum

Unterschrift